

BRUKSANVISNING

8,5 ML URIN-MONOVETTE®

- ① Trekk opp urin fra beger, flaske, bekken eller lignende ved hjelp av Urin-Monovette - spissen.
- ② Trekk opp urin til **Stopp-streken**. Løft opp Urin-Monovetten® og trekk stempelet helt ned, slik at spissen tømmer seg og det kommer litt luft inn i glasset.
- ③ Kast spissen, sett på hetten, brekk av stempelet og kast det. Unngå overfylt glass. Det bør være minst 1 cm synlig luft mellom urin og lokk.

