






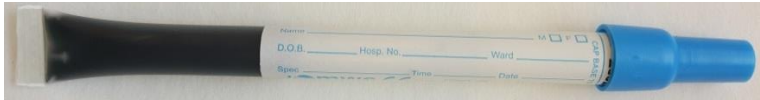


Oversikt penselprøver

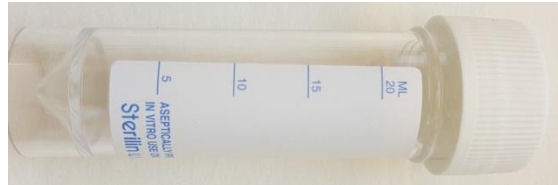
Se først på prøvemateriale (1), deretter ønsket analyse/undersøkelse(2). Velg så prøvetakingsutstyr ut fra dette (3)

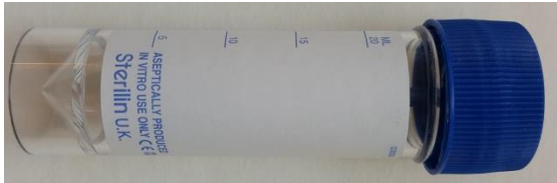

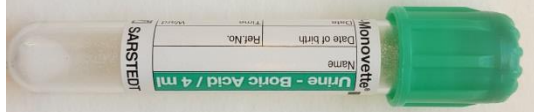
1. Prøvemateriale	2. Analyse	3. Prøvetakingsutstyr penselprøver
Urin Cervix Vagina Uretra	PCR-analyser: <ul style="list-style-type: none"> • Chlamydia trachomatis • Neisseria gonorrhoeae • Mycoplasma genitalium NB! Kan ikke benyttes til bakteriologisk dyrkning	 <p>Abbott Multi-Collect m/oransje kork</p>
Nasopharynx Hals Sår- og vesikkelsekret Øye	PCR-analyser inkludert SARS-CoV-2 : <ul style="list-style-type: none"> • Luftveisagens • Sårprøver NB! Kan ikke benyttes til bakteriologisk dyrkning	 <p>Virus transportmedium m/rød kork (UTM-RT)</p> <p>Alternative rør kan leveres som følge av mangel på utstyr 1: VTM – korkfarge kan variere</p>  <p>2: VCM</p> 
Sår Puss Genital screening Screening av: MRSA, ESBL, VRE og morsmelk Hals	Vanlig bakteriologisk undersøkelse inkludert gonokokkdyrkning NB! Kan <u>ikke</u> benyttes til molekylære analyser (PCR).	 <p>Copan eSwab m/hvit kork (rosa kork kan forekomme)</p>

1. Prøvemateriale	2. Analyse	3. Prøvetakingsutstyr penselprøver
Nasopharynx	Pertussis/kikhoste bakteriologisk dyrkning	 <p>Copan eSwab m/ blå kork</p>
Øre Øye Nese	Vanlig bakteriologisk dyrkning	 <p>Pusspinne m/ stiv pensel</p>  <p>Pusspinne m/ wire</p>

Oversikt andre rør

Se først på prøvemateriale (1), deretter ønsket analyse/undersøkelse(2). Velg så prøvetakingsutstyr ut fra dette (3)

1. Prøvemateriale	2. Analyse	3. Prøvetakingsutstyr
Hud Hår Negler	Dermatofytter	 <p>Steril universalkontainer (uten tilsetning)</p>
Ekspektorat Urin Puss (flytende)	Mykobakterier	
Ekspektorat Puss Biopsi/vev: <i>dekkes med sterilt saltvann før forsendelse</i>	Vanlig bakteriologisk undersøkelse	

1. Prøvemateriale	2. Analyse	3. Prøvetakingsutstyr
Feces	Tarmpatogene bakterier Parasitter Rotavirus Adenovirus Norovirus Sapovirus Clostridium difficile	 <p>Steril universalkonteiner m/skje</p>
Urin	Vanlig bakteriologisk undersøkelse	 <p>Monovette m/borsyre 10 ml</p>
Urin – til bruk ved lite urin	Vanlig bakteriologisk undersøkelse	 <p>Monovette m/borsyre 4 ml</p>

For blodprøvetakning, se prosedyre «**Blodprøvetaking generell veiledning - rekkefølge rør. Plakat til utskrift**»
For bestilling av prøvetakingsutstyr, se «**Bestilling av prøvetakingsutstyr**»